

DENTO-VIRACTIS SURFACES 75+

NÁVOD K POUŽITÍ

NEŘEDIT. Přípravek aplikujte opatrně ručním nanášením nebo stříkáním na ošetřovaný povrch (tvrdé a neporézní povrchy) při teplotě 18–25 °C bez předchozího pečlivého čištění. Přípravek naneste rovnoměrně ($\pm 6 \text{ ml/m}^2$, tj. přibližně 10 stříknutí) pomocí spreje nebo potíráním (ubrouskem navlhčeným přípravkem). Povrchy určené k dezinfikování musí zůstat dostatečně vlhké po požadované dobu působení, aby byla zajištěna optimální dezinfekce. Přípravek není potřeba oplachovat, pokud výrobce ošetřovaného nátěru nebo povrchů přicházejících do styku s potravinami nestanoví jinak. V případě potřeby postup opakujte.

BIOCIDNÍ ÚČINNÁ LÁTKA: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[2-(dide- cylmethylamonium)ethyl]- .omega.- hydroxy-, propanoát (sůl): 0,21 % (m/m) [CAS: 94667-33-1]

DEZINFEKČNÍ VLASTNOSTI PŘI 20 °C: Baktericidní účinek po 5 min. působení (EN 13727, EN 1276, EN 13697, EN 16615). Účinek proti kvasinkám po 5 min. působení (EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 16615). Fungicidní účinek po 15 min. působení (EN 13624, EN 13697, EN 1650). Účinný proti rotavirům a virucidní proti obaleným virům (Vaccinia virus) po 5 min. působení (EN 14476). Omezené spektrum virucidního účinku (Adenovirus a Norovirus murin) po 15 min. působení (EN 14476). Sporicidní účinek proti Clostridium difficile po 15 min. působení (EN 13704, EN 17126).

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ: Viz bezpečnostní list. Pouze pro profesionální použití. Recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s platnou legislativou. Skladujte při teplotě od 5 °C do 35 °C. Biocid TP2 včetně lékařského/zdravotnického sektoru /TP4. Tekutý přípravek (AL).


Dovozce a distributor:

Janouch Dental s.r.o.
Malá Dlážka 17
750 02 Přerov
info@janouch-dental.cz
+420 604 251 198



GTIN

LOT

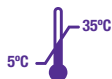

REF 3162904

Verze 1 - 06/2024

Zástupce UK
**DENTAL SKY
WHOLESALE LTD**
Foster Road,
Ashford Business Park
Ashford, Kent TN24 0SH
UK

CH REP

ACB Dentistes
Chemin du Poste 22
1279 Chavannes de Bogis
Švýcarsko

Odpovědnost za prodej:
FRANKLAB
3, avenue des Frênes
ZA de l'Observatoire
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Francie



CADENCE
2 bis, chemin du Loup
93290 Tremblay-en-France
Francie