

DENTO-VIRACTIS INSTRUPOWDER 56



**ENZYMATICKÝ PRÁŠKOVÝ DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK PRO
PŘEDDEZINFEKCI ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ**

ETQDVI0039R/2023-09

2KG / 4KG

NÁVOD K POUŽITÍ: Při odměřování prášku dbejte na to, aby byl celý povrch prášku zarovnan s ryskou odměrky. Kyblík udržujte těsně uzavřený. Ponořte zdravotnický prostředek do naředěného roztoku při dodržení uvedené doby kontaktu. V případě potřeby vyčistěte pomocí kartáčku s důrazem na duté části. Ošetřené zdravotnické prostředky důkladně opláchněte vodou z vodovodu, abyste odstranili znečištění a zbytky přípravku. U endoskopů postupujte podle místních platných doporučení.

DEZINFEKČNÍ VLASTNOSTI PŘI 20°C: Baktericidní za 5 minut při 0,5 % a za 10 minut při 0,4 % (EN 13727 a EN 14561). Kvasinkocidní za 5 minut při 0,5 % a za 15 minut při 0,4 % (EN 13624 a EN 14562). Účinný na PRV (modelový virus hepatitidy B) za 5 minut při 0,5 % a za 15 minut při 0,4 % (EN 14476). Účinný na Herpes virus za 10 minut při 0,4 % (EN 14476). Účinný na Vaccinia virus za 15 minut při 0,4 % (EN 17111).

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ: Viz bezpečnostní list. NEBEZPEČÍ. EC 287-089-1: KVARTERNÍ AMONIOVÉ SLOUČENINY, BENZYL-C12-14-ALKYLDIMETHYL, CHLORIDY. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Velmi toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Používejte ochranné rukavice / oděv / ochranu očí a obličeje. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Okamžitě svlékněte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte pokožku vodou (nebo sprchou). PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li přítomny a lze-li to snadno provést. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě zavolejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM nebo lékaře. Skladujte na suchém místě, mimo dosah vlhkosti a tepla.

POZNÁMKY (REV: 2023-08-28): První uvedení na trh: 2021-05. Zdravotnický prostředek určený výhradně pro profesionální použití k předdezinfekci invazivních zdravotnických prostředků vyžadujících dezinfekci podle jejich návodu k použití, jako jsou chirurgické nástroje, vybavení operačních sálů, oftalmologické a kontaktologické vybavení. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Doporučuje se používat odměrku dodanou výrobcem. Při odměřování dbejte na to, aby byl celý povrch prášku zarovnan s ryskou. Uchovávejte nádobu těsně

uzavřenou. Předdezinfekční lázeň použijte pouze jednou (nebo se řiďte místními doporučeními). Nedovolte kontakt s kyselinami, aldehydy a chlorem. Výrobek a obal likvidujte jako nebezpečný odpad na plnou odpovědnost držitele odpadu. Nevyhazujte zbytky do kanalizace a vodních toků. Jakoukoli závažnou událost týkající se produktu musíte oznámit výrobci a příslušnému orgánu. Zkontrolujte kompatibilitu ošetřených materiálů s materiály testovanými v korozních studiích COR010436: Kompatibilita s bichromátovou ocelí, nerezovou ocelí, eloxovaným hliníkem, barevným filtrem, PVC tyčinkou a silikonem; citlivý na surovou ocel, surový hliník, mosaz a zinek.

Spotřebujte do 2 měsíců.
(od otevření)

Koncentrace: 0,5 % (5 g / litr)
Doba kontaktu: 5 minut
Při teplotě: 20 °C

Koncentrace: 0,4 % (4 g / litr)
Doba kontaktu: 15 minut
Při teplotě: 20 °C

Dovozce a distributor:

Janouch Dental s.r.o.
Hradištská 161
735 62 Český Těšín
info@janouch-dental.cz
+420 604 251 198



viz štítek na kyblíku



2 KG

MD

Version 1 – 09/2023
1043602DV_F6V1_2023/09



3160881



FRANKLAB
3, avenue des Frênes
ZA de l'Observatoire
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
France

ACB DENTISTES SA,
22 Chemin du Poste
1279 CHAVANNES DE BOGIS, SWITZERLAND



CADENCE
2 bis, chemin du loup
93290 Tremblay-en-France
FRANCE

